

マスクフィットテスターユーザー様

日本カノマックス株式会社
環境計測事業部

USB ドライバー個別インストールのご案内

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、カノマックス商品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。
マスクフィットテスターPC 用アプリケーションソフトウェアインストール時に OS の種類により、USB ドライバーを別途インストールする
必要がありますので下記の通りご案内いたします。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

○ USB ドライバーの個別インストールについて

- ・ OS が Windows11 の PC を用いて、マスクフィットテスター本体と USB 通信を行う場合、「setup.exe」実行によるアプリケーションソフトウェアのインストールとは別に、USB ドライバーを個別でインストールする必要があります。
別途、「**CP210x Driver(for Windows11)**」をインストールしてください。
- ・ OS が Windows10 の場合は、「**CP210x Driver**」が「setup.exe」の実行と同時にインストールされる為、個別インストールは不要です。

○ USB ドライバーのインストール方法

- ・ USB ドライバー「**CP210x Driver(for Windows11)**」のインストール方法は、「**AccuFIT9000(PRO) Application software User Manual(Japanese)**」の「**第 6 章**」の「**USB 接続**」の項、及び、別紙「Windows11 用 USB ドライバーのインストール手順書」をご参照下さい。

【お問い合わせ先】 日本カノマックス株式会社
〒565-0805 大阪府吹田市清水 2-1
TEL : 【フリーダイヤル】0120-009-750 (受付時間: 平日 8:45~17:15)
E-MAIL : environment@kanomax.co.jp

以上

1. ソフトウェアのダウンロード

マスクフィットテスターPC 用アプリケーションソフトウェア（以下ソフトウェア）を付属 CD-ROM または下記ダウンロードサイトからダウンロード後、インストールを行ってください。

https://www.kanomax.co.jp/support/mftpro_dl/

※本ソフトウェアをインストールする場合は、必ず管理者権限を持ったユーザーでログオンしてください。

- 1) 上記 URL から「PC ソフトウェア・デバイスドライバー」をダウンロードし、zip ファイルを解凍してください。以下の操作はエクスプローラから行ってください。
- 2) ご使用の Windows に従って、解凍したフォルダ内の[32bit]フォルダまたは、[64bit]フォルダを開きます。
- 3) 「Setup.exe」を開きます。
- 4) 画面に従ってインストールを行います。
- 5) インストールが終了すると、スタートメニューに「AccuFit9000」が登録されます。

2. 初期設定

インストールした本ソフトウェアを起動して、初期設定を行ってください。

初期設定の詳細は、AccuFit9000 PRO 計測ソフトウェアの、第 5 章 初期設定の項をご参照下さい。

3. 本体電源 ON

AccuFIT9000(PRO)本体の電源を ON にしてください。


4. パソコンとの接続

USB ケーブルで AccuFIT9000(PRO)本体とパソコンを接続します。




5. USB ドライバーのインストール


- 1) Windows 検索窓から「デバイスマネージャー」検索し、選択して開きます。

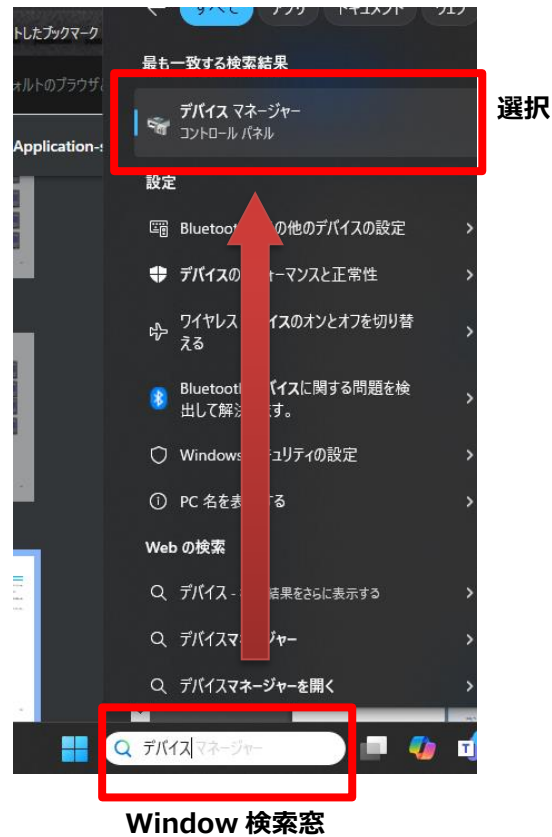


- 2) デバイスマネージャー画面から「CP2102 USB to UART Bridge Controller」を選択します。

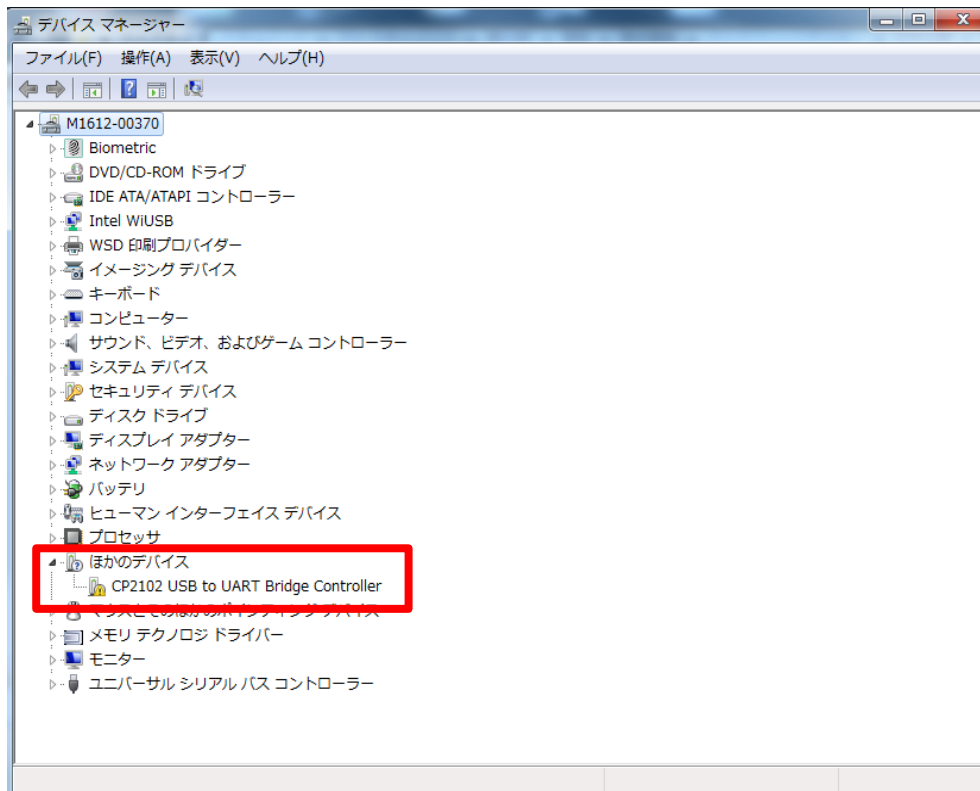


- 3) 「CP2102 USB to UART Bridge Controller」を選択した状態で右クリックし、表示されたメニューから「プロパティ」をクリックします。

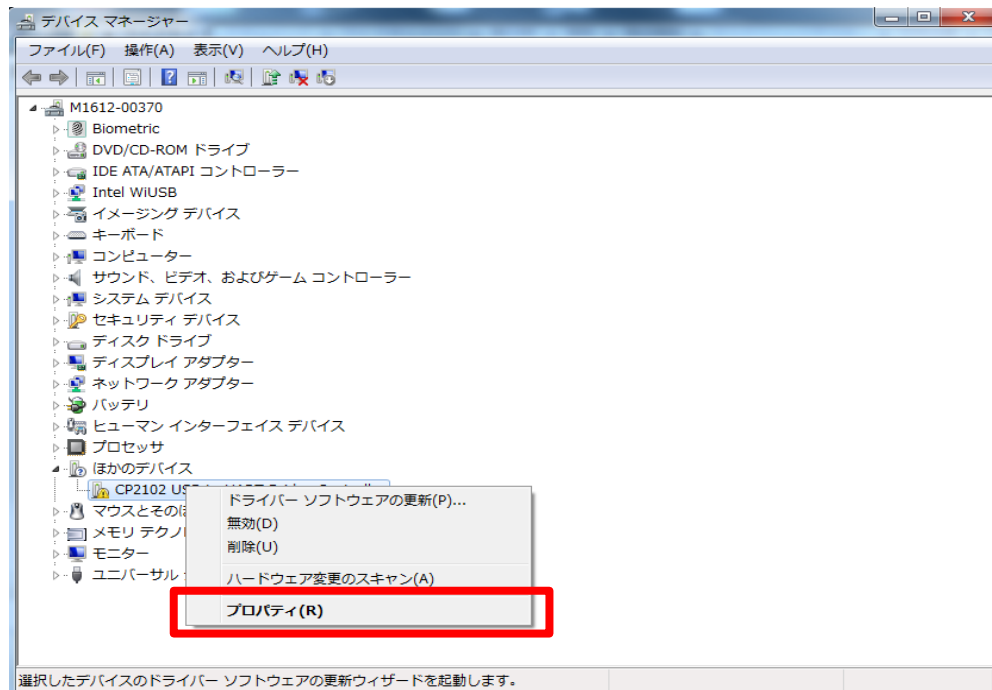


- 4) プロパティ画面の「ドライバーの更新」ボタンをクリックします。

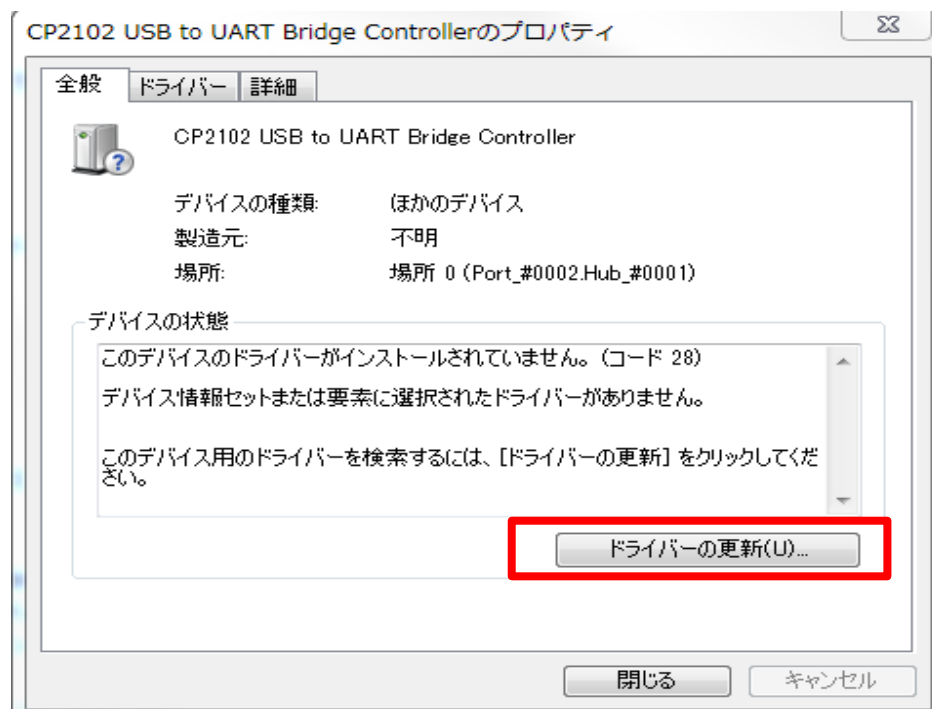


5) ドライバーソフトウェアの更新画面から、「コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します」をクリックします。

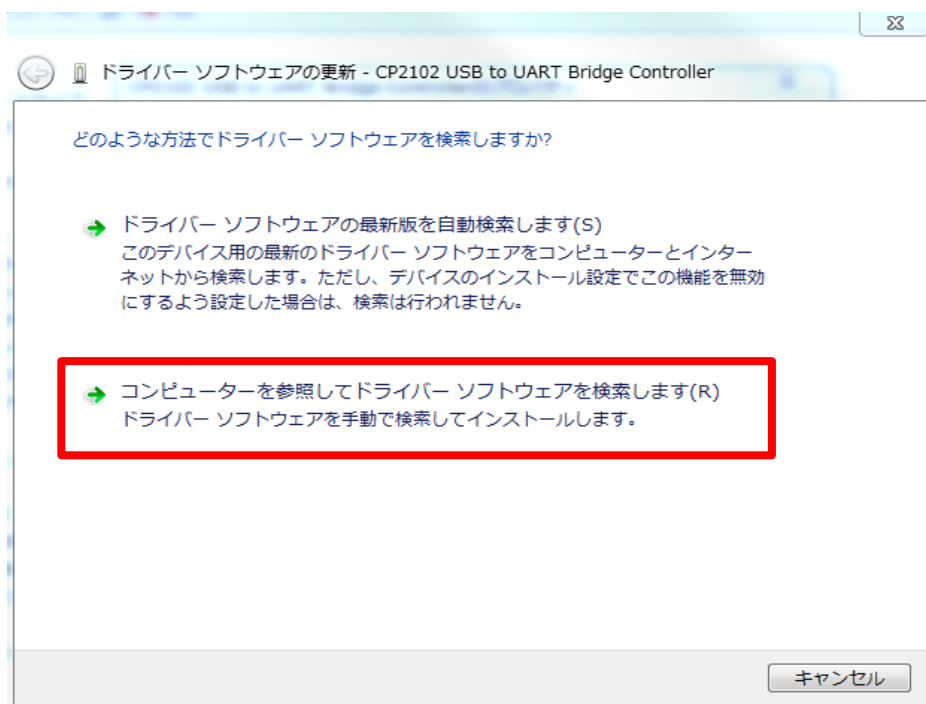


6) 「参照」ボタンをクリックして、**1. 1)ソフトウェアダウンロード**の項でダウンロードして解凍したフォルダ内の「CP210x driver(for Windows11)」のフォルダを選択してください。

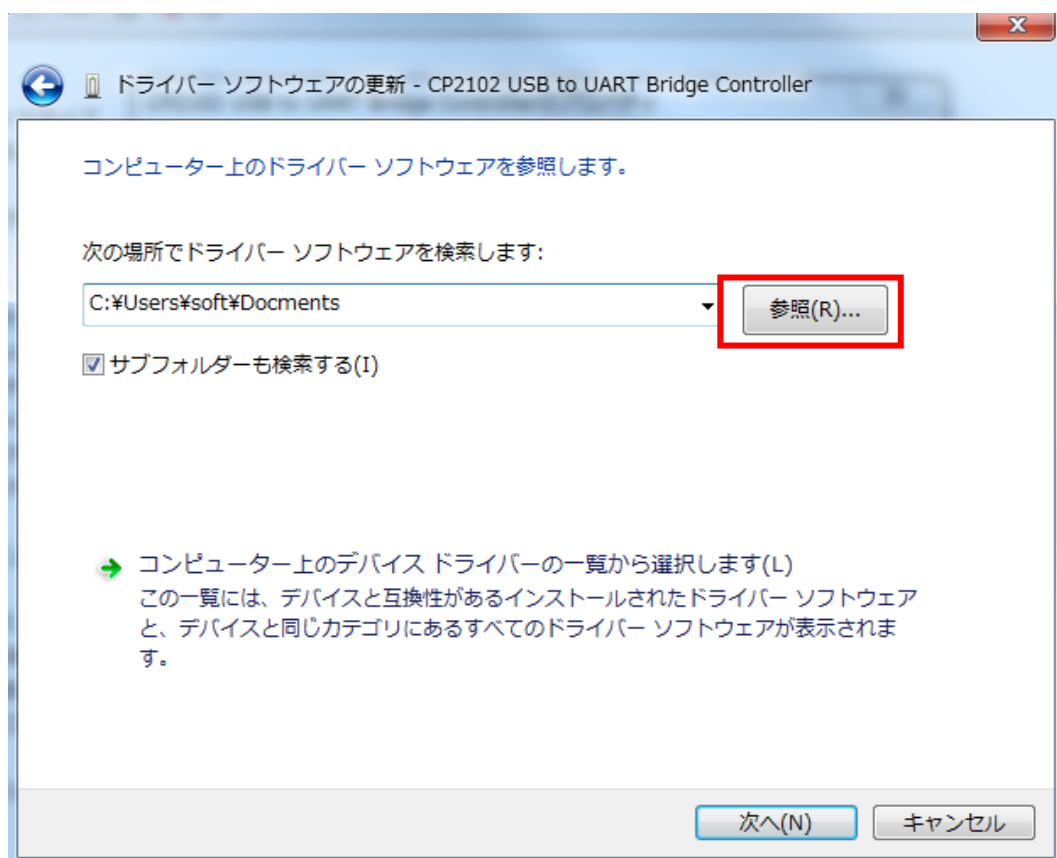


※参考：参照先画面例（解凍したフォルダを保存した場所により表示される文字列は変わります）

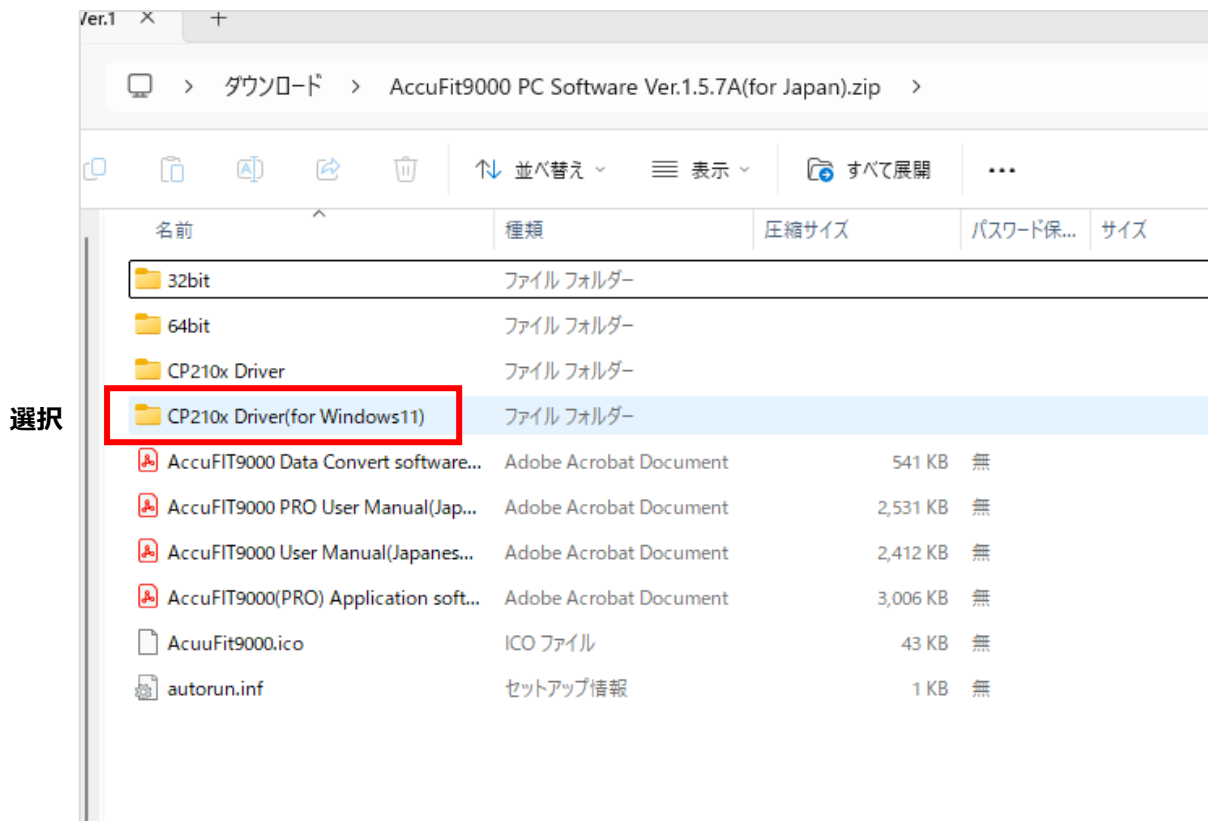

- 7) ドライバーソフトウェアの更新画面で「CP210x driver(for Windows11)」のフォルダが選択されていることを確認し、「次へ」ボタンをクリックしてください。ドライバーのインストールが始まります。

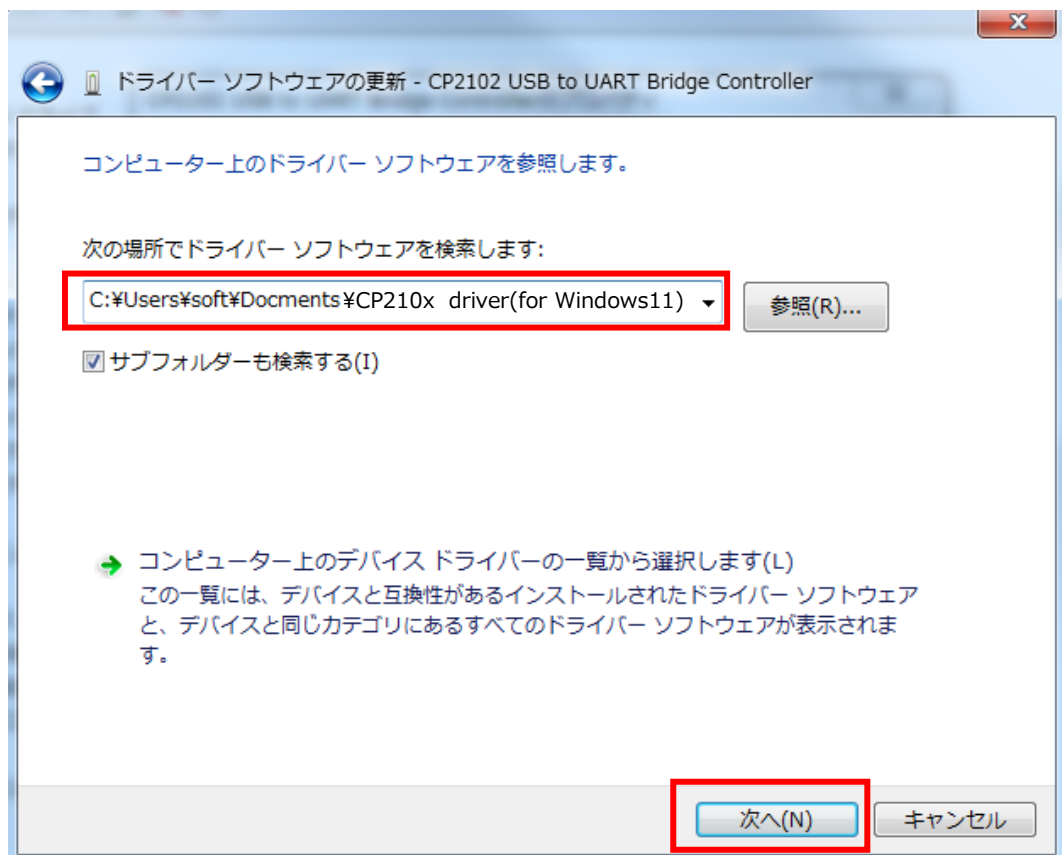

8) インストールが完了すると次の画面が表示されますので、「閉じる」ボタンをクリックしてこの画面を閉じます

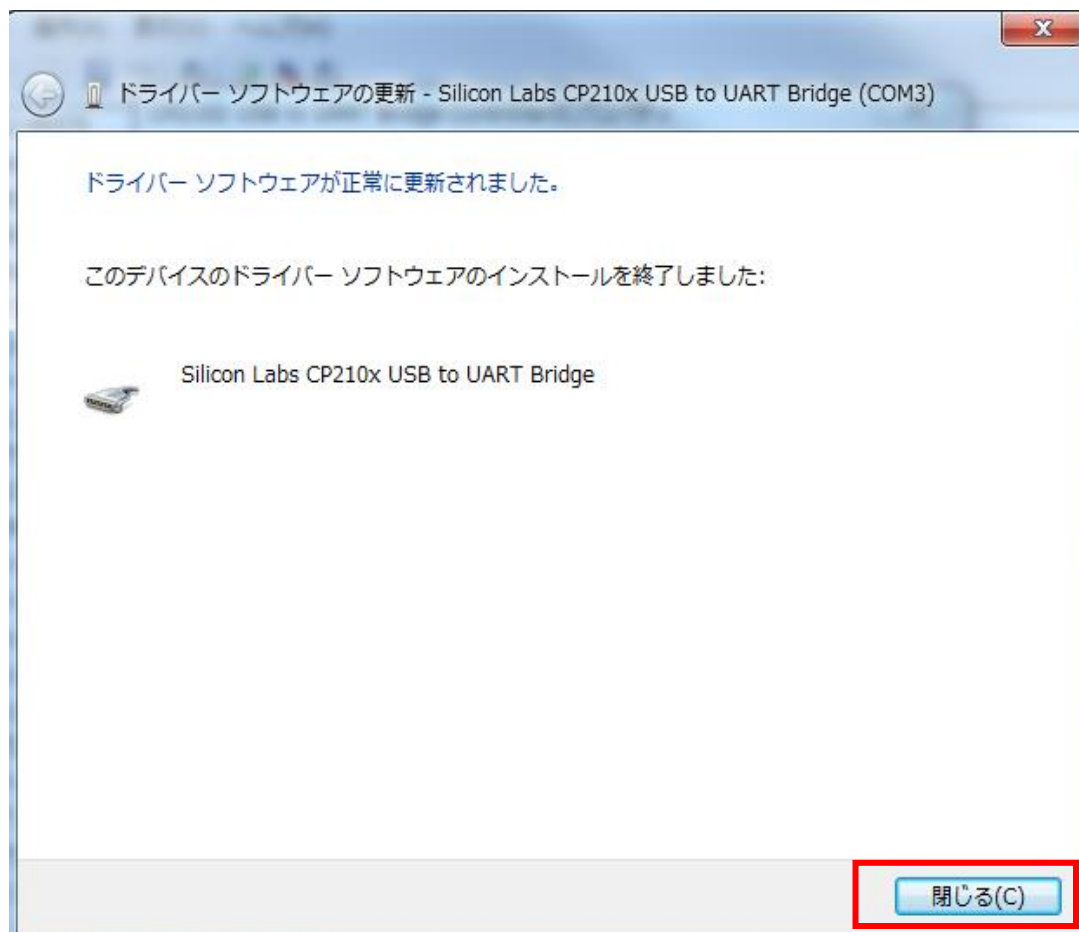

9) 「Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge(COMx) Property」画面に戻りますので「閉じる」ボタンをクリックして閉じます。以上で USB 接続が可能になります。